



[Vidensbase](#) > [Brug af Care Tracker](#) > [Hvordan ser jeg, hvor brugeren befinder sig lige nu?](#)

Hvordan ser jeg, hvor brugeren befinder sig lige nu?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Brug af Care Tracker](#)

Hvordan ser jeg, hvor brugeren befinder sig lige nu?

Kort fortalt:

Du kan se, hvor uret befinder sig, direkte i **Care Tracker appen**. Kortet vises, når du aktiverer **Find-GPS**, og viser urets position i realtid.

Sådan gør du:

1. Åbn **Care Tracker appen**.
2. Vælg det ur, du vil se.
3. Tryk på **Find-GPS**.
Kortet åbner automatisk, og du kan se urets placering.
Uret sender sin position hvert **15. sekund**, så du kan følge bevægelsen live.
4. Når du er færdig, luk **Find-GPS** igen.
Uret vender automatisk tilbage til normal opdatering hvert **10. minut** for at spare batteri.

Tip:

- Du kan zoome ind på kortet og trykke på markøren for at se den præcise adresse.
- Tjek tidspunktet nederst i visningen for at se, hvornår positionen sidst blev opdateret.

Bemærk:

Hvis uret står som *offline*, vises kortet ikke, før der igen er forbindelse.