



[Vidensbase](#) > [Kom godt i gang](#) > [Hvordan aktiverer jeg min Care Tracker første gang?](#)

Hvordan aktiverer jeg min Care Tracker første gang?

Mari Opstad - 2026-02-09 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Kom godt i gang](#)

Hvordan aktiverer jeg min Care Tracker første gang?

Din Care Tracker er næsten klar, når du modtager den. Du skal kun oplade den kort og forbinde den til appen første gang.

Sådan gør du:

1. **Sæt Care Tracker til opladning.** Brug den medfølgende oplader. Uret tænder automatisk og er klar til opsætning med det samme.
2. **Download Stella Care appen** fra App Store eller Google Play.
3. **Opret din bruger.** Brug den e-mail, du anvendte ved bestilling.
4. **Scan QR-koden på uret.**

1. Swipe **to gange fra højre mod venstre** på urskiven. QR-koden vises på skærmen.
2. Åbn appen, vælg Tilføj enhed, og scan QR-koden med telefonens kamera.
5. Navngiv dit ur og tryk **Gem**.

Når det er gjort, kan du se urets status som Online i appen. Så er din Care Tracker klar til brug.