



[Vidensbase](#) > [Opsætning og tilpasning](#) > [Hvordan tilføjer jeg flere alarmmodtagere?](#)

Hvordan tilføjer jeg flere alarmmodtagere?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Opsætning og tilpasning](#)

Hvordan tilføjer jeg flere alarmmodtagere?

Kort fortalt:

Du kan nemt tilføje flere alarmmodtagere i **Care Tracker appen**, så flere pårørende får besked, hvis uret forlader et område.

Sådan gør du:

1. Åbn **Care Tracker appen**.
2. Vælg det ur, du vil tilføje alarmmodtagere til, og tryk på **Indstillinger**.
3. Vælg **Administrer alarmmodtagere**.
4. Tryk på **Tilføj alarmmodtager**.
5. Indtast navn, telefonnummer og e-mailadresse på den person, du vil tilføje.
6. Tryk **Gem**.
7. Personen får en mail med et link til at oprette sig i Care Tracker appen.
8. Gentag processen, hvis du vil tilføje flere alarmmodtagere.

Tip:

Du kan have flere alarmmodtagere på samme ur – fx både familiemedlemmer og andre nære personer.

Sørg for, at alle alarmmodtagere har notifikationer slået til, så de får besked, hvis uret forlader et geofence.

Bemærk:

Kun personer, du aktivt tilføjer som alarmmodtagere, kan se urets position og modtage beskeder.

Relateret indhold

- [Flere pårørende. Kan vi være flere i appen?](#)
- [Hvordan modtager jeg alarmer?](#)