



[Vidensbase](#) > [Opsætning og tilpasning](#) > [Hvordan ændrer jeg notifikationsindstillinger for et ur?](#)

Hvordan ændrer jeg notifikationsindstillinger for et ur?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Opsætning og tilpasning](#)

Hvordan ændrer jeg notifikationsindstillinger for et ur?

Kort fortalt:

Du kan tilpasse, hvordan Care Tracker appen giver **besked for hvert ur**. Det betyder, at du selv bestemmer, hvordan du bliver advaret, når der sker noget vigtigt - fx hvis uret forlader et område eller har lavt batteri.

Sådan gør du:

1. Åbn **Care Tracker appen**.
2. Vælg det ur, du vil ændre indstillinger for, og tryk på **Indstillinger**.
3. Vælg **Notifikationer**.
4. Her kan du justere følgende:
 1. **Aktivér eller deaktiver vibration**. Bestem om telefonen skal vibrere, når der kommer en besked.
 2. **Aktivér eller deaktiver lyde**. Vælg om beskeder skal have lyd.
 3. **Alarmlyd**. Vælg, hvilken lyd der skal afspilles ved alarmer, fx når uret bevæger sig uden for et geofence.
 4. **Advarselslyd**. Vælg en lyd til advarsler, fx når uret har lavt batteri.

Tip:

- Ændringer gemmes automatisk, når du justerer indstillingerne.
- Du kan tilpasse notifikationer for hvert ur individuelt, hvis du har flere Care Trackere.
- Vælg tydelige lyde, så du hurtigt kan høre forskel på alarmer og advarsler.

Bemærk:

Hvis du ikke modtager beskeder, så tjek, at Care Tracker appen har tilladelse til at sende notifikationer i din telefons indstillinger.