



[Vidensbase](#) > [Opsætning og tilpasning](#) > [Hvordan vælger jeg urskive på uret?](#)

Hvordan vælger jeg urskive på uret?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Opsætning og tilpasning](#)

Hvordan vælger jeg urskive på uret?

Kort fortalt:

Du kan selv vælge, hvilket **urskive-design** der vises på uret. I Care Tracker appen kan du vælge mellem både **analoge og digitale** urskiver og se, hvilket design du bedst kan lide.

Sådan gør du:

1. Åbn **Care Tracker appen**.
2. Vælg det ur, du vil ændre.
3. Gå til **Indstillinger**.
4. Vælg **Urskivedesign**.
5. Swipe mellem de forskellige designs for at se, hvordan de ser ud.
6. Tryk **Gem** ved det design, du ønsker, uret skal vise.

Tip:

Du kan altid ændre urskiven igen, hvis du vil have et andet udtryk.

Ændringen træder i kraft med det samme på uret.