



[Vidensbase](#) > [Opsætning og tilpasning](#) > [Hvordan opretter jeg et geofence?](#)

Hvordan opretter jeg et geofence?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Opsætning og tilpasning](#)

Hvordan opretter jeg et geofence?

Kort fortalt:

Du kan nemt tilføje et geofence i **Care Tracker appen**, så du får besked, hvis uret bevæger sig ud af et bestemt område.

Sådan gør du:

1. Åbn **Care Tracker appen**.
2. Vælg det ur, du vil oprette et geofence for, og tryk på **Indstillinger**.
3. Vælg **Geofence** i menuen.
4. Tryk på **Tilføj geofence**.
5. Giv geofencet et navn - fx Hjem, Arbejde eller Sommerhus.
6. Skriv adressen, som skal være centrum for geofence-området.
7. Justér størrelsen på området ved at bruge slideren. Geofence skal have en radius på **minimum 100 meter**.
8. Tryk **Gem** for at aktivere dit geofence.

Tip:

- Du kan tilføje flere geofences for samme ur - fx et omkring hjemmet, arbejdet eller sommerhuset.
- Navngiv geofences tydeligt, så du let kan kende forskel på dem i appen.

Bemærk:

Hvis uret mister GPS-signal, kan beskeden om, at brugeren har forladt området, blive forsinket, indtil forbindelsen vender tilbage.

Relateret indhold

- [Hvad er et geofence?](#)