



[Vidensbase](#) > [Opsætning og tilpasning](#) > [Hvordan modtager jeg alarmer?](#)

Hvordan modtager jeg alarmer?

Mari Opstad - 2026-02-09 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Opsætning og tilpasning](#)

Hvordan modtager jeg alarmer?

For at modtage notifikationer og varslinger fra appen, som for eksempel når uret forlader et geofence eller når batteriet er lavt, skal du være tilføjet som alarmmodtager på uret.

Sådan gør du trin for trin:

1. Log ind i Care Tracker appen.
2. Vælg det ur, du vil modtage alarmer fra.
3. Vælg **Indstillinger**.
4. Vælg **Alarmmodtagere**.
5. Slå dig selv til som alarmmodtager.

Når du er tilføjet, modtager du alarmer og varslinger fra appen.

Hvilke alarmer kan jeg modtage?

Som alarmmodtager kan du blandt andet få besked, når uret bevæger sig uden for et geofence, eller når uret har lavt batteri.

Tip:

Du kan også tilføje andre personer som alarmmodtagere ved at vælge **Tilføj alarmmodtager**.

Relateret indhold

- [Hvordan tilføjer jeg flere alarmmodtagere?](#)