



[Kunnskapsbase](#) > [Bruk av Care Tracker](#) > [Hvordan kan jeg se hvor brukeren er akkurat nå?](#)

Hvordan kan jeg se hvor brukeren er akkurat nå?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Bruk av Care Tracker](#)

Hvordan kan jeg se hvor brukeren er akkurat nå?

Du kan se klokken posisjon direkte i Care Tracker-appen.

Når du aktiverer Finn GPS, vises et kart med klokken sanntidsposisjon.

Slik gjør du:

1. Åpne Care Tracker-appen.
2. Velg klokken du vil se.
3. Trykk på Finn GPS.
Kartet åpnes automatisk og viser klokken posisjon.
Klokken sender sin posisjon hvert 15. sekund, slik at du kan følge bevegelsen i sanntid.
4. Når du er ferdig, lukker du Finn GPS igjen.
Klokken går automatisk tilbake til normale oppdateringer hvert 10. minutt for å spare batteri.

Tips:

- Du kan zoome inn på kartet og trykke på markøren for å se den eksakte adressen.
- Sjekk tidsstempelen nederst på skjermen for å se når posisjonen sist ble oppdatert.

Merk:

Hvis klokken vises som offline, vil ikke kartet vises før forbindelsen er gjenopprettet.