



[Kunnskapsbase](#) > [Oppsett og tilpasning](#) > [Hvordan legger jeg til flere alarmmottakere?](#)

Hvordan legger jeg til flere alarmmottakere?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Oppsett og tilpasning](#)

Hvordan legger jeg til flere alarmmottakere?

Du kan enkelt legge til flere alarmmottakere i Care Tracker-appen slik at flere pårørende mottar varsel dersom klokken forlater et bestemt område.

Slik gjør du:

1. Åpne Care Tracker-appen.
2. Velg klokken du vil legge til alarmmottakere for, og trykk på Innstillinger.
3. Velg Administrer alarmmottakere.
4. Trykk på Legg til alarmmottaker.
5. Skriv inn navn, telefonnummer og e-postadresse til personen du vil legge til.
6. Trykk på Lagre.
7. Personen vil motta en e-post med en lenke for å opprette sin konto i Care Tracker-appen.
8. Gjenta prosessen dersom du ønsker å legge til flere alarmmottakere.

Tips:

- Du kan ha flere alarmmottakere for samme klokke – for eksempel familiemedlemmer eller andre nære kontakter.
- Sørg for at alle alarmmottakere har varsler aktivert slik at de mottar beskjed dersom klokken forlater et geofence.

Merk:

Kun personer du aktivt legger til som alarmmottakere, kan se klokken sin posisjon og motta varsler.

Relatert innhold

- [Flere pårørende. Kan vi være flere i appen?](#)
- [Hvordan mottar jeg alarmer?](#)