



[Kunnskapsbase](#) > [Oppsett og tilpasning](#) > [Hvordan velger jeg urskive på klokken?](#)

Hvordan velger jeg urskive på klokken?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Oppsett og tilpasning](#)

Hvordan velger jeg urskive på klokken?

Du kan velge hvilken urskive som skal vises på klokken. I Care Tracker-appen kan du velge mellom både analoge og digitale urskiver og se hvilket design du foretrekker.

Slik gjør du:

1. Åpne Care Tracker-appen.
2. Velg klokken du vil endre.
3. Gå til Innstillinger.
4. Velg Klokkeutseende.
5. Sveip gjennom de ulike designene for å se hvordan de ser ut.
6. Trykk på Lagre på designet du vil at klokken skal vise.

Tips:

Du kan alltid endre urskiven igjen hvis du ønsker et annet utseende.

Endringen trer i kraft umiddelbart på klokken.