



[Kunnskapsbase](#) > [Oppsett og tilpasning](#) > [Hvordan oppretter jeg et geofence?](#)

Hvordan oppretter jeg et geofence?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Oppsett og tilpasning](#)

Hvordan oppretter jeg et geofence?

Du kan enkelt legge til et geofence i Care Tracker-appen for å motta varsler dersom klokken beveger seg utenfor et bestemt område.

Slik gjør du:

1. Åpne Care Tracker-appen.
2. Velg klokken du vil opprette et geofence for, og trykk på Innstillinger.
3. Velg Geofence i menyen.
4. Trykk på Legg til geofence.
5. Gi geofence-området et navn – for eksempel Hjem, Arbeid eller Hytte.
6. Angi adressen som skal være sentrum for geofence-området.
7. Juster størrelsen på området med glidebryteren. Et geofence må ha en minimumsradius på 100 meter.
8. Trykk på Lagre for å aktivere geofence-området.

Tips:

- Du kan legge til flere geofencer for samme klokke – for eksempel rundt hjemmet, arbeidsplassen eller hytta.
- Gi geofence-områdene tydelige navn slik at du enkelt kan skille dem fra hverandre i appen.

Merk:

Dersom klokken midlertidig mister GPS-signalet, kan varsler om at brukeren har forlatt området bli forsinket til forbindelsen er gjenopprettet.

Relatert innhold

- [Hva er et geofence?](#)