



[Kunnskapsbase](#) > [Oppsett og tilpasning](#) > [Hvordan mottar jeg alarmer?](#)

Hvordan mottar jeg alarmer?

Mari Opstad - 2026-02-09 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Oppsett og tilpasning](#)

Hvordan mottar jeg alarmer?

For å motta varsler og alarmer fra appen, for eksempel når klokken forlater et geofence eller når batteriet er lavt, må du være lagt til som alarmmottaker for klokken.

Steg for steg:

1. Logg inn i Care Tracker-appen.
2. Velg klokken du ønsker å motta alarmer fra.
3. Velg Innstillinger.
4. Velg Alarmmottakere.
5. Aktiver deg selv som alarmmottaker.

Når du er lagt til, vil du motta alarmer og varsler fra appen.

Hvilke alarmer kan jeg motta?

Som alarmmottaker kan du motta varsler, for eksempel når klokken beveger seg utenfor et geofence eller når klokken har lavt batterinivå.

Tips:

Du kan også legge til andre personer som alarmmottakere ved å velge Legg til alarmmottaker.

Relatert innhold

- [Hvordan legger jeg til flere alarmmottakere?](#)