



[Kunskapsbas](#) > [Användning av Care Tracker](#) > [Hur kan jag se var användaren är just nu?](#)

Hur kan jag se var användaren är just nu?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Användning av Care Tracker](#)

Hur kan jag se var användaren är just nu?

Du kan se klockans position direkt i Care Tracker-appen.

När du aktiverar Hitta GPS visas en karta med klockans position i realtid.

Så här gör du:

1. Öppna Care Tracker-appen.
2. Välj den klocka du vill visa.
3. Tryck på Hitta GPS.
Kartan öppnas automatiskt och visar klockans position.
Klockan skickar sin position var 15:e sekund, så att du kan följa rörelsen i realtid.
4. När du är klar stänger du Hitta GPS igen.
Klockan återgår automatiskt till normala uppdateringar var 10:e minut för att spara batteri.

Tips:

- Du kan zooma in på kartan och trycka på markören för att se den exakta adressen.
- Kontrollera tidsstämpeln längst ner på skärmen för att se när positionen senast uppdaterades.

Obs:

Om klockan visas som offline visas inte kartan förrän anslutningen är återställd.