



[Kunskapsbas](#) > [Inställning och anpassning](#) > [Hur lägger jag till fler larmmottagare?](#)

Hur lägger jag till fler larmmottagare?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Inställning och anpassning](#)

Hur lägger jag till fler larmmottagare?

Du kan enkelt lägga till flera larmmottagare i Care Tracker-appen så att flera anhöriga får en avisering om klockan lämnar ett visst område.

Så här gör du:

1. Öppna Care Tracker-appen.
2. Välj den klocka som du vill lägga till larmmottagare för och tryck på Inställningar.
3. Välj Administrera larmmottagare.
4. Tryck på Lägg till larmmottagare.
5. Ange namn, telefonnummer och e-postadress till personen du vill lägga till.
6. Tryck på Spara.
7. Personen får ett e-postmeddelande med en länk för att skapa sitt konto i Care Tracker-appen.
8. Upprepa processen om du vill lägga till fler larmmottagare.

Tips:

- Du kan ha flera larmmottagare för samma klocka - till exempel familjemedlemmar eller andra närstående.
- Se till att alla larmmottagare har aktiverat notiser så att de får aviseringar om klockan lämnar ett geofence.

Obs:

Endast personer som du aktivt lägger till som larmmottagare kan se klockans position och ta emot aviseringar.

Liknande innehåll

- [Flera anhöriga. Kan vi vara flera i appen?](#)

- [Hur tar jag emot larm?](#)