



[Kunskapsbas](#) > [Inställning och anpassning](#) > [Hur väljer jag en urtavla på klockan?](#)

Hur väljer jag en urtavla på klockan?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Inställning och anpassning](#)

Hur väljer jag en urtavla på klockan?

Du kan välja vilken urtavla som ska visas på klockan. I Care Tracker-appen kan du välja mellan både analoga och digitala urtavlor och se vilken design du föredrar.

Så här gör du:

1. Öppna Care Tracker-appen.
2. Välj den klocka du vill ändra.
3. Gå till Inställningar.
4. Välj Urtavlans design.
5. Svep mellan de olika designerna för att se hur de ser ut.
6. Tryck på Spara på den design du vill att klockan ska visa.

Tips:

Du kan alltid ändra urtavlan igen om du vill ha ett annat utseende.

Ändringen träder i kraft direkt på klockan.