



[Kunskapsbas](#) > [Inställning och anpassning](#) > [Hur skapar jag ett geofence?](#)

Hur skapar jag ett geofence?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Inställning och anpassning](#)

Hur skapar jag ett geofence?

Du kan enkelt lägga till ett geofence i Care Tracker-appen för att få aviseringar om klockan rör sig utanför ett visst område.

Så här gör du:

1. Öppna Care Tracker-appen.
2. Välj den klocka du vill skapa ett geofence för och tryck på Inställningar.
3. Välj Geofence i menyn.
4. Tryck på Lägg till geofence.
5. Ge geofencet ett namn – till exempel Hem, Arbete eller Sommarstuga.
6. Ange adressen som ska vara centrum för geofence-området.
7. Justera områdets storlek med reglaget. Ett geofence måste ha en minsta radie på 100 meter.
8. Tryck på Spara för att aktivera ditt geofence.

Tips:

- Du kan lägga till flera geofences för samma klocka – till exempel runt hemmet, arbetsplatsen eller sommarstugan.
- Ge dina geofences tydliga namn så att du enkelt kan skilja dem åt i appen.

Obs:

Om klockan tillfälligt förlorar GPS-signalen kan aviseringar om att användaren har lämnat området bli fördröjda tills anslutningen är återställd.

Liknande innehåll

- [Vad är ett geofence?](#)