



[Kunskapsbas](#) > [Inställning och anpassning](#) > [Hur tar jag emot larm?](#)

Hur tar jag emot larm?

Mari Opstad - 2026-02-09 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Inställning och anpassning](#)

Hur tar jag emot larm?

För att ta emot aviseringar och larm från appen, till exempel när klockan lämnar ett geofence eller när batterinivån är låg, måste du läggas till som larmmottagare för klockan.

Steg för steg:

1. Logga in i Care Tracker-appen.
2. Välj den klocka som du vill ta emot larm från.
3. Välj Inställningar.
4. Välj Larmmottagare/användare.
5. Aktivera dig själv som larmmottagare.

När du har lagts till kommer du att ta emot larm och aviseringar från appen.

Vilka larm kan jag ta emot?

Som larmmottagare kan du ta emot aviseringar, till exempel när klockan rör sig utanför ett geofence eller när klockan har låg batterinivå.

Tips:

Du kan även lägga till andra personer som larmmottagare genom att välja Lägg till larmmottagare.

Liknande innehåll

- [Hur lägger jag till fler larmmottagare?](#)