



[Kunnskapsbase](#) > [Mobil app](#) > [Enheder](#) > [Enhedsindstillinger](#)

Enhedsindstillinger

Mari Opstad - 2025-11-21 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Enheder](#)

Enhedsindstillinger

Denne vejledning forklarer, hvilke indstillinger du kan ændre for en enhed i Stella Care appen, og hvordan du tilpasser lyd og navngivning efter behov.

Sådan åbner du enhedsindstillinger

1. Gå til **Enheder** i appen eller åbn borgerens side og vælg enheden.
2. Tryk på enheden for at åbne dens detaljer.
3. Tryk på knappen **Indstillinger** for at åbne enhedens indstillingsmenu.

Hvad du kan ændre i enhedsindstillinger

Navn på enheden

- Du kan ændre enhedens navn, så den er lettere at genkende i appen.
- Indtast det nye navn og gem ændringen.

Lydindstillinger

- Vælg hvilken lyd enheden skal bruge ved alarmer.
- Vælg hvilken lyd enheden skal bruge ved advarsler, for eksempel lavt batteri.
- Du kan slå vibration og lyde til eller fra efter behov.

Disse indstillinger gør det muligt at tilpasse enhedens notifikationer, så de passer til borgerens behov og jeres arbejdsgange.

Tips

- Brug et navn der gør det nemt at se hvilken borger enheden hører til.
- Vælg en tydelig alarmlyd så du ikke overser vigtige hændelser.

Relatert innhold

- [Notifikasjonsindstillinger](#)
- [Kontoindstillinger \(redigér navn, e-mail, telefon\)](#)