



[Kunnskapsbase](#) > [Administrationssystem](#) > [Historik](#) > [Brug batterigrafen - forstå batteriydelsen over tid](#)

Brug batterigrafen - forstå batteriydelsen over tid

Phillip Hansen - 2025-11-28 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Historik](#)

Brug batterigrafen - forstå batteriydelsen over tid

Denne vejledning forklarer, hvordan du åbner og forstår batterigrafen i Stella Cares [Administration System](#). Batterigrafen viser, hvordan enhedens batteriniveau har ændret sig over en valgt periode og kan bruges til at identificere mønstre, opladningsvaner eller tekniske problemer.

Sådan åbner du batterigrafen

1. Gå til **Borgere** i navigationsmenuen i venstre side.
2. Klik på den borger, du vil se.
3. Find den enhed, du vil se historik for, og klik på (□) ikonet i kolonnen "Historik".
4. Et nyt vindue åbner med fanen "Aktivitets historik".
5. Klik på fanen **Batterigraf**.

Du vil nu se batterigrafen for den valgte enhed i den valgte periode.

Sådan fungerer batterigrafen

- Batterigrafen viser batteriniveauet i procent over tid.
- Øverst kan du vælge en periode ved at indtaste datoer i felterne "Fra" og "Til".

Grafen viser typisk:

- **Fald i batteriniveau:** Enheden har været i brug eller tændt i længere tid.
- **Pludselige stigninger:** Enheden er blevet opladet.
- **Mønstre over flere dage:** For eksempel hvis enheden ofte løber tør for strøm eller ikke oplades regelmæssigt.

Jo stejlere faldet er, desto større strømforbrug har enheden haft i perioden.

Hvad du kan bruge batterigrafen til

- Identificere om enheden oplades korrekt
- Du kan se, hvornår den sættes til opladning, og om opladningen sker regelmæssigt.

Find tegn på problemer

Hvis batteriet drænes usædvanligt hurtigt, kan det skyldes:

- Dårlig signaldækning
- Forkerte indstillinger (fx hyppig rapportering)
- Konstant bevægelse eller intensiv brug

Planlægge bedre opladningsrutiner

Hvis enheden ofte løber tør for strøm, kan grafen hjælpe med at tilpasse rutiner.

Tips

- Vælg gerne en længere periode (fx 7-14 dage) for at se tydeligere mønstre.
- Kombiner batterigrafen med aktivitetshistorikken for at forstå ændringer i batteriniveauet.
- Hvis batteriet ofte falder hurtigt, kan du kontrollere enhedens indstillinger eller kontakte Stella Care Support.

Relateret innhold

- [Se udviklingen i batteritid](#)
- [Se borgerens historik](#)