



[Kunskapsbas](#) > [Mobil app](#) > [Indstillinger](#) > [Notifikationsindstillinger](#)

## Notifikationsindstillinger

Mari Opstad - 2026-05-28 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Indstillinger](#)

## Notifikationsindstillinger

Denne vejledning forklarer, hvordan du tilpasser dine notifikationer i Stella Care appen, så du får beskeder på den måde der passer dig bedst.

### Sådan ændrer du dine notifikationsindstillinger

1. Tryk på **tandhjul-ikonet** øverst til højre i appen for at åbne indstillinger.
2. Vælg menuen **Notifikationer**.
3. Du får nu vist de indstillinger du kan justere for lyd og vibration.
4. Ændringerne gemmes automatisk.

### Hvad kan du justere?

- **Vibration**  
Slå vibration til eller fra, når du modtager en meddelelse.
- **Generelle lyde**  
Slå alle lyde fra, hvis du har brug for ro.
- **Lyd for meddelelser**  
Vælg om appen skal afspille en lyd, når der kommer en ny alarm eller advarsel.

### Tips

- Hvis du ofte overser meddelelser, kan det være en fordel at have både lyd og vibration slået til.
- Dine notifikationsindstillinger påvirker kun din egen telefon og ikke andre brugere.

## Liknande innehåll

- [Kontoindstillinger \(redigér navn, e-mail, telefon\)](#)
- [Forstå meddelelser \(alarmer, advarsler, beskeder\)](#)
- [Enhedsindstillinger](#)