



[Kunskapsbas](#) > [Mobil app](#) > [Enheder](#) > [Overblik over enheder i appen](#)

Overblik over enheder i appen

Mari Opstad - 2025-11-19 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Enheder](#)

Overblik over enheder i appen

Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger Enheder-visningen i Stella Care appen, og hvordan du får et samlet overblik over alle enheder du har adgang til.

Sådan fungerer Enheder-visningen

1. Åbn appen.
2. Tryk på fanen Enheder nederst på skærmen.
3. Du får nu vist en liste over alle enheder du har rettigheder til at se, uanset hvilken afdeling de hører til.

For hver enhed kan du se:

- Enhedsnavn
- Enhedens ID nummer
- Batteriprocent
- Et statusikon der viser enhedens aktuelle tilstand

Statusikoner betyder:

- **Rød** viser at enheden er uden for geofence
- **Grå** viser at enheden er offline
- **Gul** viser lavt batteri
- **Grøn** viser at alt er ok
- **Grøn med lyn** viser at enheden er til opladning

Hvad du kan gøre fra Enheder-fanen

Når du trykker på en enhed, får du adgang til:

- **Historik** via ur-ikonet
- **Sporing** via Find GPS knappen
- **Enhedsindstillinger** via indstillingsikonet

Dette gør det nemt at gå direkte til det du skal, uanset hvilken afdeling enheden tilhører.

Tips

- Brug Enheder hvis du hurtigt skal finde en specifik enhed uden at navigere gennem afdelinger.
- Enheder med kritiske statusser placeres automatisk øverst på listen.

Liknande innehåll

- [Se borgerens enheder](#)
- [Forstå startsidens i appen \(Afdelinger og Enheder\)](#)