



[Kunskapsbas](#) > [Mobil app](#) > [Enheder](#) > [Afspil lyd på enheden](#)

Afspil lyd på enheden

Mari Opstad - 2026-05-29 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Enheder](#)

Afspil lyd på enheden

Denne vejledning forklarer, hvordan du får en GPS-enheden til at afspille en hørlig lyd fra Stella Care appen. Funktionen bruges, når du skal finde enheden fysisk.

Sådan afspiller du lyd på enheden

1. Gå til **Enheder** i appen eller åbn borgerens side og vælg enheden.
2. Tryk på enheden for at åbne dens detaljer.
3. Tryk på knappen **Lav lyd**.
4. Enheden afspiller nu en tydelig lyd i cirka **20 sekunder**.

Dette gør det lettere at finde enheden, hvis den ligger gemt i en taske, seng, jakke eller i et rum hvor den ikke er synlig.

Tips

- Hvis du befinder dig i nærheden af borgeren, kan lyden hjælpe dig med at finde enheden hurtigt uden at skulle starte en samtale.

Liknande innehåll

- [Ring til enhed](#)
- [Spor en enhed i appen](#)