



[Kunskapsbas](#) > [Administrationssystem](#) > [Historik](#) > [Se udviklingen i batteritid](#)

Se udviklingen i batteritid

Phillip Hansen - 2025-11-28 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Historik](#)

Se udviklingen i batteritid

Denne guide forklarer, hvordan du kan se udviklingen i en enheds batteritid i Stella Cares [Administrationssystem](#). Funktionen viser, hvor mange timer enheden har kunnet køre på en fuld opladning over tid. Det gør det muligt at opdage ændringer i batteriets tilstand, opladningsmønstre eller tekniske problemer.

Sådan åbner du udvikling i batteritid

1. Gå til **Borgere** i navigationsmenuen i venstre side.
2. Klik på den borger, du vil se historik for.
3. Find den enhed, du vil se historik for, og klik på (□) ikonet i kolonnen **Historik**.
4. Et nyt vindue åbner med fanen **Aktivitets historik**.
5. Klik på fanen **Udvikling i batteritid**.

Du ser nu en graf, som viser, hvor mange timer enheden har kørt fra 100 % til 0 % for hver dag med tilgængelige data.

Sådan fungerer grafen

Grafen viser:

- Afladningstid i timer pr. fuld opladning for hver dag i den valgte periode.
- Høje søjler betyder længere batteritid (f.eks. lav aktivitet, stabil dækning, færre bevægelser).
- Lave søjler betyder kortere batteritid (f.eks. høj aktivitet, dårlig dækning eller hyppige GPS-opdateringer).

Du kan vælge perioden øverst ved at indtaste datoer i felterne "Fra" og "Til".

Hvad er god batteritid?

Det varierer fra borger til borger, men generelt gælder:

- Stabil batteritid over tid indikerer et sundt batteri og stabile brugsmønstre.

- Store udsving kan skyldes forskel i daglig aktivitet, dårlig signalstyrke eller uregelmæssig opladning.
- En tydelig faldende tendens kan betyde batterislitage eller behov for gennemgang af enhedens indstillinger.

Opdage batterislitage

Hvis batteritiden gradvist falder over flere uger, kan det tyde på et ældre eller slidt batteri.

Fejlfinding

Pludseligt meget lav batteritid kan skyldes:

- Dårlig dækning
- Høj bevægelse
- Dårlig device opsætning
- Mange alarmer fra enheden
- Frequent reports from the device
- En oplader, der ikke fungerer korrekt

Vurdere opladningsvaner

Hvis batteritiden varierer meget, kan det tyde på, at enheden ikke oplades regelmæssigt.

Tips

- Brug gerne en periode på 30-60 dage for det bedste overblik.
- Sammenlign udviklingen i batteritid med batterigrafen for at se, hvad der er sket på dage med unormalt forbrug.
- Kontakt Stella Care Support, hvis batteritiden bliver markant kortere uden en tydelig forklaring.

Liknande innehåll

- [Brug batterigrafen – forstå batteriydelsen over tid](#)
- [Se borgerens historik](#)